



CARATTERISTICHE

- Gli adattatori APA e RD40 sono semplici da installare sulla maschera Aria 19, anche mentre la si indossa.
- Gli strap possono essere regolati rapidamente e si adattano a diverse forme del volto, permettendo all'utilizzatore di indossarla e rimuoverla comodamente.
- La voce dell'utilizzatore viene percepita chiaramente attraverso la Maschera Aria 19 permettendo una buona comunicazione.
- L'alta trasparenza del visore permette una perfetta visione (ampio campo ottico) con una leggera distorsione ottica in piccole aree periferiche.



**VARI FILTRI
COMPATIBILI**



TESTATA CO₂



RIUTILIZZABILE



ANTI APPANNAMENTO

FUNZIONAMENTO

L'aria potenzialmente contaminata viene inalata dall'utilizzatore tramite un solo ingresso (la bocchetta dell'adattatore APA per filtri) e attraverso il corpo del filtro ed una valvola di non ritorno. Il filtro purifica l'aria in base alle sue caratteristiche e proprietà certificate. L'aria sanificata e respirabile arriva quindi nella parte del visore, direzionata da un deflettore posizionato nella parte superiore della maschera: questa azione previene l'appannamento. L'aria, in seguito, attraversa due valvole di non ritorno poste sulla guarnizione oronasale, punto in cui l'utilizzatore inspira l'aria. Una volta che l'utilizzatore esala l'aria esausta, le due valvole di non ritorno della guarnizione oronasale specificatamente progettata, impediscono il ritorno dell'aria nella zona oculare della maschera.



- ARIA CONTAMINATA
- FILTRO
- VALVOLA DI NON RITORNO FLUSSO ARIA DEPURATA
- FLUSSO ARIA ESAUSTA

CODICI PRODOTTI

- ▶ OR-019085.SMALL *KIT ARIA 19 - MISURA SMALL
- ▶ OR-019086.MEDIUM *KIT ARIA 19 - MISURA MEDIUM
- ▶ OR-019087.LARGE *KIT ARIA 19 - MISURA LARGE
- ▶ MA-40040-SP *ARIA 19 - FILTRO A VITE 100 P3 R BLU
- ▶ OR-033304 ARIA 19 - SUPPORTO PER LENTI DA VISTA