

LT

ANTROS KATEGORIJOS ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS PAGAL EUROPOS REGLAMENTĄ 2016/425**PAGAMINTA PAGAL STANDARTĄ UNI EN ISO 16321-1:2022**

Ši informacinė pastaba turi būti saugoma visą AAP naudojimo laikotarpį.

A) INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

el: info@larident.it - svetainėje: www.larident.it

B) TEISINĖS NUORODOS

Šios informacinės pastabos tikslas – paaiškinti apsaugines savybes, naudojimo sąlygas, priežiūrą, plovimą bei įspėjimus ir (arba) naudojimo apribojimus, taikomus AAP apsauginiams skydeliams. AAP užtikrins reikiamą apsaugos lygį tik tuo atveju, jei bus nepažeista, tinkamai užsidėta ir užfiksuota. Kilus abejonėms ar prireikus paaiškinimų, susisieki su savo vadovu ir, jei reikia, su gamintoju bei skaitykite instrukcijų vadovą.

Informacinė pastaba pateikiama su kiekviena pakuote ir ji turi būti atidžiai perskaityta prieš naudojimą. Ši informacinė pastaba parengta pagal standartą UNI EN ISO 16321-1:2022.

AAP buvo sertifikuota kaip II kategorijos AAP – priemonė, skirta apsaugoti ją dėvintį asmenį nuo lengvų smūgių svetimkūniais pavojaus; laikantis esminių Europos reglamento 2016/425 sveikatos ir saugos reikalavimų. R5 įrenginys atitinka UNI EN ISO 16321-1:2022 standarto reikalavimus, išskyrus matymo lauką, kuris yra ribotas viršutinėje dalyje. Matymas į priekį ir žemyn yra garantuojamas.

C) APSAUGOS PRIEMONĖS MODELIO IDENTIFIKAVIMAS

Apsauginis skydelis R5 - Rėmelis su 6 skaidriais polikarbonato ekranais.

D) LAIKYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS**• Užsidėjimo instrukcijos**

Užsidėkite AAP ir tinkamai nustatykite ją ant veido taip, kad ekranas dengtų reikiamas vietas; užtikrinkite gerą prigludimą sureguliuodami dirželį pagal naudotojo veidą / galvą. AAP charakteristikos užtikrinamos tik tada, kai ji yra tinkamai užsidėta ir nustatyta. Pastebėjus bet kokį matomą nusidėvėjimą, nutraukite naudojimą ir pakeiskite priemonę nauja. **Bet kokie AAP pakeitimai yra draudžiami.**

• Dydžiai

Įrenginys yra vieno dydžio, tačiau dėl reguliuojamos elastinės juostos puikiai prisitaiko prie bet kokios veido formos.

• Pabavimo pastabos ir laikymo instrukcijos

Galutinis gaminio pakavimas turi būti atliekamas taip, kad jis išliktų nepakitęs iki naudojimo momento ir per visą naudojimo laikotarpį. Šio gaminio galiojimo laikas neribotas; gaminyje turi būti laikomas nepažeistoje ir sandarioje pakuotėje, atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių.

• Šalinimas

Jei priemonės nebuvo užterštos specialiomis medžiagomis ar produktais, jas galima šalinti kaip įprastą plastiko atlieką; priešingu atveju jos turi būti šalinamos laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų dėl specialiųjų atliekų.

E) SPECIFINĖS VALYMO IR (ARBA) DEZINFEKAVIMO INSTRUKCIJOS

Apsauginiam skydeliui valyti sudrėkinkite šluostę muilu ir nealkoholinėmis dezinfekavimo priemonėmis, tada švelniai nuvalykite rėmelį bei ekraną, pašalindami dėmes ir nešvarumus.

F) DUOMENYS APIE NAUDOJIMO SRITĮ, NUMATOMĄ APLINKOS NAUDOJIMO INTERVALĄ, APSAUGINES GEBĖJIMUS IR VEIKSMINGUMO CHARAKTERISTIKAS

Bet koks kitoks naudojimas, nei nurodyta, laikomas netinkamu, o gamintojas neatsako už galimą žalą.

Naudojamos medžiagos - Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite medžiagų techninių duomenų lapą.

G) ĮSPĖJIMAI

- Apsauginiai skydeliai turi būti pakeisti kiekvieną kartą, kai dėl įbrėžimų ar galimo matinio atspalvio suprastėja skaidrumas.
- Apsauginiai skydeliai, patyrę smūgius, neturi būti naudojami, jie turi būti išmesti ir pakeisti naujais.
- Užsidėkite AAP prieš susidurdami su pavojumi, nuo kurio ši AAP yra skirta apsaugoti.
- Naudokite tik gamintojo tiekiamas originalias atsargines dalis.
- AAP turi būti pritaikytos visose jos dalyse, kad būtų užtikrinta maksimali apsauga.

H) PASKELBTOJI ĮSTAIGA

R5 modelio apsauginis skydelis priklauso II kategorijos AAP, todėl jam reikalingas paskelbtosios įstaigos išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas pagal Reglamentą (ES) 2016/425: Paskelbtoji įstaiga Nr. 0426 - ITALCERT S.r.l.

Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)

Atitikties nuoroda: info@larident.it.

I) ŽENKLINIMAS

Lęšio ženklavimo identifikavimas

CE – LARIDENT – R5

CE (CE ženklas) – LARIDENT (Gamintojas) – R5 (Gaminio pavadinimas)

Rėmelio ženklavimo identifikavimas

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Gamintojas) – R5 (Gaminio pavadinimas) – CE (CE ženklas)

J) INSTRUKCIJOSE IR ŽENKLINIME NAUDOJAMI SIMBOLIAI

Instrukcijose ir ant pakuotės naudojama simbolika yra ši, remiantis reglamentu UNI EN ISO 16321-1:2022




Simbolis „atidžiai perskaitykite instrukcijas“




CE atitikties ženklas

K) MONTAVIMO INSTRUKCIJOS


- Pasukite rėmą taip, kad kaiščiai ir kreiptuvai būtų nukreipti į naudotojo veidą.
- Paimkite skydelį ir šiek tiek jį sulenkite. Pradėdami nuo centro, pirmiausia įkiškite skydelį į aukščiausią kreipiklį, tada įstumkite jį į žemiausią. Tai padarę, įspauskite centrinę skylę į centrinį kaištį (horizontalioje padėtyje), kad AAP pradėtų įgauti apskritimo formą.
- Šiuo metu įstumkite skydelį į išorinius kreipiklius ir tada pirštais įspauskite skylę į kaištį (horizontalioje padėtyje).
- Įkiškite skydelį į paskutines dvi kreipiklius ir įstumkite skylę į kaištį (horizontalioje padėtyje).
- Uždenkite ventiliacijos angą plėvele.
- Dėl didesnio saugumo pritvirtinkite elastinę kilpą, įkišdami ją į patogiausią skylę.
- Skydelis paruoštas.

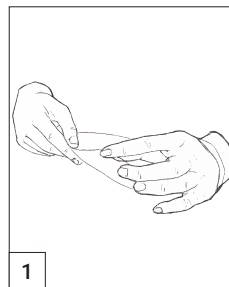


1

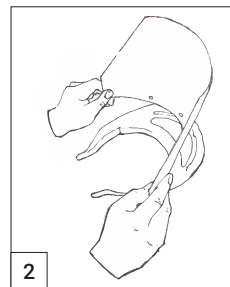


2

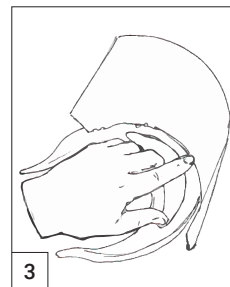


3

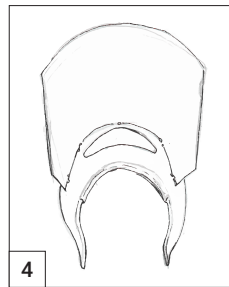


4

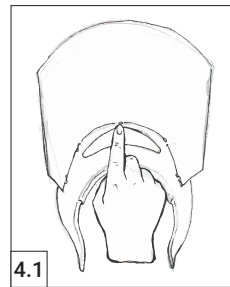


4.1

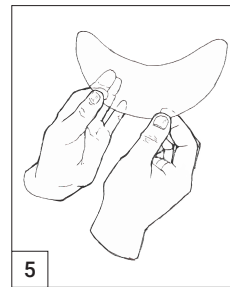

5

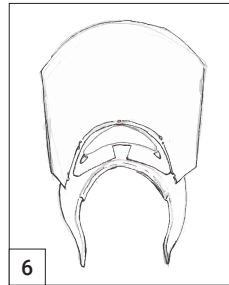

6

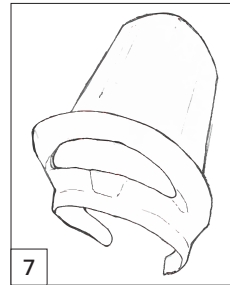

7