

PT

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE SEGUNDA CATEGORIA AO ABRIGO DO REGULAMENTO EUROPEU 2016/425 FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA UNI EN ISO 16321-1:2022

A presente nota informativa deve ser conservada durante todo o período de vida do EPI em utilização.

A) INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - website: www.larident.it

B) REFERÊNCIAS NORMATIVAS

O objetivo desta nota informativa é esclarecer as características de proteção, as condições de utilização, a manutenção, a lavagem e as advertências e/ou limitações de utilização do EPI Viseiras de Proteção Facial. O EPI só pode oferecer o nível de proteção necessário se estiver intacto, corretamente usado e apertado. Se tiver dúvidas ou necessitar de esclarecimentos, contacte o seu supervisor e, se aplicável, o fabricante e consulte o manual de instruções.

O aviso de informação é fornecido com cada embalagem e deve ser lido cuidadosamente antes da utilização. Esta nota informativa foi elaborada em conformidade com a norma EN ISO 16321-1:2022.

O EPI foi certificado como EPI de categoria II para os dispositivos destinados a serem utilizados para proteger o utilizador contra o risco de ser atingido por impactos ligeiros com corpos estranhos; em conformidade com os requisitos essenciais de saúde e segurança do Regulamento Europeu 2016/425. O dispositivo R5 cumpre os requisitos da norma UNI EN ISO 16321-1:2022, exceto no que diz respeito ao campo de visão, que é limitado na parte superior. A visão frontal e inferior é garantida.

C) IDENTIFICAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

Viseira de proteção facial R5 - Armação com 6 visores de policarbonato transparente.

D) INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO**• Instruções de utilização**

Equipar o EPI e posicioná-lo corretamente no rosto, com o visor a cobrir o rosto nos sítios certos e certificando-se de que fica bem ajustado, ajustando o cordão de acordo com o rosto/cabeça do utilizador. O desempenho do EPI é garantido quando este é corretamente utilizado e posicionado. Se for visível qualquer deterioração, interromper a utilização e substituir o equipamento por um novo. Não são permitidas modificações ao EPI.

• Tamanhos

O dispositivo é fornecido num único tamanho, mas usando a banda elástica ajustável, adapta-se perfeitamente a qualquer formato de rosto.

• Notas de embalagem e instruções de conservação

O embalamento final do produto deve ser efetuado de forma a manter-se inalterado até ao momento de uso e durante todo o período de utilização. O produto em causa não tem prazo de validade; o produto deve ser conservado em embalagens fechadas e seladas, longe de fontes de calor diretas.

• Eliminação

Se os dispositivos não tiverem sido contaminados com substâncias ou produtos especiais, podem ser eliminados como resíduos de plástico normais; caso contrário, devem ser eliminados de acordo com os requisitos legais para resíduos especiais.

E) INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DE LIMPEZA E/OU DESINFECÇÃO

Para limpar a viseira, humedeça um pano com sabões e desinfetantes sem álcool e passe suavemente sobre a armação e visor, removendo manchas e sujidade.

F) DETALHES SOBRE O CAMPO DE UTILIZAÇÃO, O INTERVALO AMBIENTAL DA UTILIZAÇÃO PREVISTA, AS CAPACIDADES DE PROTEÇÃO E AS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Qualquer utilização diferente da indicada é considerada incorreta e quaisquer danos não são da responsabilidade do fabricante.

Materiais utilizados - Para mais informações, consultar a ficha de dados do material.

G) ADVERTÊNCIAS

- As viseiras de proteção devem ser substituídas sempre que a transparência seja afetada por linhas ou por uma eventual opacidade.
- As viseiras que tenham sido sujeitas a impactos não devem ser utilizadas e devem ser eliminadas e substituídas.
- Usar o EPI antes de se expor ao risco contra o qual o EPI foi concebido.
- Utilizar apenas peças sobressalentes originais fornecidas pelo fabricante.
- O EPI deve ser ajustado em todas as suas partes para garantir a máxima proteção.

H) ORGANISMO NOTIFICADO

A viseira do modelo R5 pertence à Categoria II de EPI e, por conseguinte, necessita da emissão da UE do tipo de conformidade ao Regulamento (UE)

2016/425 por um organismo notificado: Organismo notificado N. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milão (MI)

Ligações de conformidade: info@larident.it.

I) MARCAÇÃO

Identificação da marcação na lente

CE – LARIDENT – R5

CE (Marcação CE) – LARIDENT (Fabricante) – R5 (Nome do produto)

Identificação da marcação da armação/atadura

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Fabricante) – R5 (Nome do produto) – CE (Marcação CE)

J) SÍMBOLOS UTILIZADOS NAS INSTRUÇÕES E NA ROTULAGEM

A simbologia utilizada nas instruções e na caixa é a seguinte, baseada na norma UNI EN ISO 16321-1:2022



Símbolo de ler atentamente as instruções



Marcação de conformidade CE

K) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Rode a armação de forma a que os pinos e as guias fiquem virados para o rosto do utilizador.
2. Pegue na viseira e flexione-a ligeiramente. Começando pelo centro, insira primeiro a viseira na guia mais alta e, em seguida, deslize-a para a mais baixa. Feito isto, empurre o orifício central para o pino central (horizontal) para que o EPI comece a assumir um formato circular.
3. Neste ponto, deslize a viseira para as guias mais externas e, em seguida, empurre o orifício no pino (horizontal) com os dedos.
4. Insira a viseira nas duas últimas guias e, em seguida, empurre o orifício para o pino (horizontal).
5. Utilize a película para tapar o orifício de ventilação.
6. Para maior segurança, prenda o elástico inserindo-o no orifício mais confortável.
7. A viseira está pronta.

