

EL

ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/425**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 16321-1:2022**

Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα πρέπει να φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του ΜΑΠ.

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - δικτυακός τόπος: www.larident.it

Β) ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα αποσκοπεί στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά προστασίας, τις συνθήκες χρήσης, τη συντήρηση, τις οδηγίες πλύσης και τις προειδοποιήσεις ή/και τους περιορισμούς χρήσης του ΜΑΠ «Προστατευτικές Προσωπίδες». Το ΜΑΠ μπορεί να παρέχει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας μόνο εάν είναι άθικτο, σωστά τοποθετημένο και ασφαλισμένο. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή αιτημάτων για διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό σας και, εφόσον απαιτείται, με τον κατασκευαστή και συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το ενημερωτικό σημείωμα συνοδεύει κάθε συσκευασία και πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη χρήση της. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συντάχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 16321-1:2022. Το ΜΑΠ έχει πιστοποιηθεί ως ΜΑΠ κατηγορίας II για μέσα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του χρήστη από τον κίνδυνο ελαφρών κρούσεων από ξένα σώματα. Το μέσο R66 έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/425 και σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 16321-1:2022.

Γ) ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστατευτική προσωπίδα R66 - Σκελετός με 6 διαφανείς ασπίδες από πολυανθρακικό.

Δ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**• Οδηγίες τοποθέτησης**

Φορέστε το ΜΑΠ και τοποθετήστε το σωστά στο πρόσωπο, έτσι ώστε η ασπίδα να καλύπτει το πρόσωπο στα κατάλληλα σημεία, διασφαλίζοντας την καλή εφαρμογή του μέσω της ρύθμισης του ιμάντα ανάλογα με το πρόσωπο/κεφάλι του χρήστη. Οι επιδόσεις του ΜΑΠ διασφαλίζονται όταν αυτό είναι σωστά τοποθετημένο και εφαρμοσμένο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οπτικά οποιαδήποτε φθορά, διακόψτε τη χρήση του και προχωρήστε στην αντικατάστασή του με ένα νέο μέσο. Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στο ΜΑΠ.

• Μεγεθθ

Η συσκευή διατίθεται σε Ενιαίο Μέγεθος, αλλά μέσω της χρήσης του ρυθμιζόμενου ιμάντα προσαρμόζεται τέλεια σε κάθε σχήμα προσώπου.

• Σημειώσεις για τη συσκευασία και οδηγίες φυλάξης

Η τελική συσκευασία του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να διατηρείται αναλλοίωτο μέχρι τη στιγμή της χρήσης και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χρήσης. Το εν λόγω προϊόν δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε αέρας και σφραγισμένη συσκευασία μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας.

• Διαθεση

Εάν τα μέσα δεν έχουν μολυνθεί από συγκεκριμένες ουσίες ή προϊόντα, μπορούν να απορριφθούν ως κοινά πλαστικά απορρίμματα· σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για τα ειδικά απόβλητα.

Ε) ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Για τον καθαρισμό της προσωπίδας, υγράνετε ένα πανί με σαπούνια και απολυμαντικά χωρίς αλκοόλη και περάστε το απαλά πάνω στον σκελετό και στην ασπίδα, αφαιρώντας λεκέδες και ρύπους.

Φ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κάθε χρήση διαφορετική από την ενδειγμένη θεωρείται ακατάλληλη και τυχόν ζημιές δεν μπορούν να αποδοθούν στον κατασκευαστή.

Χρησιμοποιούμενα υλικά - Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων των υλικών.

Γ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Οι προστατευτικές προσωπίδες πρέπει να αντικαθίστανται κάθε φορά που η διαφάνεια αλλοιώνεται λόγω γρατσουνιών ή τυχόν θολότητας.
- Οι προσωπίδες που έχουν υποστεί κρούσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται.
- Φορέστε το ΜΑΠ πριν εκτεθείτε στον κίνδυνο για τον οποίο έχει σχεδιαστεί το ΜΑΠ.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

- Το ΜΑΠ πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο και έχει σχεδιαστεί για μετωπικές κρούσεις. Δεν παρέχει προστασία από κρούσεις από πάνω, λόγω του κενού μεταξύ της ασπίδας και του σκελετού.

Η) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Η προσωπίδα μοντέλο R66 ανήκει στην κατηγορία II των ΜΑΠ και, ως εκ τούτου, απαιτεί την έκδοση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425, από κοινοποιημένο οργανισμό: Κοινοποιημένος οργανισμός αριθ. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Μιλάνο (MI)

Σύνδεσμος συμμόρφωσης: info@larident.it.

Ι) ΣΗΜΑΝΣΗ

Ταυτοποίηση σήμανσης στον φακό

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (Σήμανση CE) – LARIDENT (Κατασκευαστής) – R66 (Ονομασία προϊόντος) – 1 (Ενισχυμενες οπτικές επιδόσεις)

Ταυτοποίηση σήμανσης στον σκελετό

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Πρότυπο) – LARIDENT (Κατασκευαστής) – 1-M (Κεφαλή δοκιμής ISO 18526-4) – R66 (Ονομασία προϊόντος) – CE (Σήμανση CE)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.larident.it (ο χρήστης μπορεί να βρει την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή στο ενημερωτικό σημείωμα και στον παρόντα δικτυακό τόπο)

Ϊ) ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στις οδηγίες και στο κουτί, βάσει του κανονισμού UNI EN ISO 16321-1:2022



Σύμβολο διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες



Σήμανση συμμόρφωσης CE

Κ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


1. Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες και από τις δύο πλευρές.
2. Η ασπίδα πρέπει να τοποθετείται εξωτερικά του σκελετού, με το άνοιγμα της μύτης προς τα κάτω.
3. Εισαγάγετε την ασπίδα στα δύο πλευρικά πτερύγια του σκελετού, περνώντας τα μέσα από τη μεγαλύτερη οπή της ασπίδας και, στη συνέχεια, ασφαλίστε τα χρησιμοποιώντας τη μικρότερη οπή.
4. Θυμηθείτε να ρυθμίσετε την προσωπίδα ανάλογα με το σχήμα του προσώπου, φροντίζοντας ώστε να εφαρμόζει καλά στα ζυγωματικά.
5. Η προσωπίδα είναι έτοιμη.




1



2

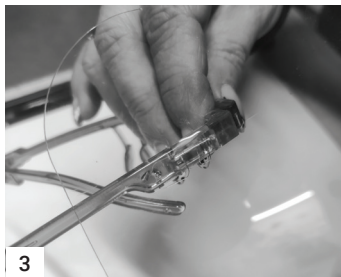

3

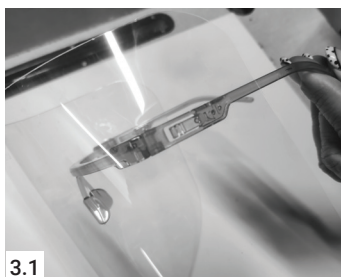

3.1



4-5