

RO

**ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE DE CATEGORIA A DOUA
CONFORM REGULAMENTULUI EUROPEAN 2016/425 FABRICATE
CONFORM STANDARDULUI UNI EN ISO 16321-1:2022**

Această notă de informare trebuie păstrată pe toată durata de viață utilă a EIP utilizat.

A) INFORMAȚII PRIVIND PRODUCĂTORUL

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - site: www.larident.it

B) REFERINȚE NORMATIVE

Scopul acestei note de informare este de a oferi clarificări cu privire la caracteristicile de protecție, condițiile de utilizare, întreținerea, spălarea și avertismentele și/sau limitele de utilizare a EIP viziere de protecție. Acest EIP va putea asigura nivelul necesar de protecție numai dacă este intact, corect purtat și fixat. Dacă aveți îndoieli sau aveți nevoie de clarificări, adresați-vă superiorului dumneavoastră și, la nevoie, producătorului și consultați manualul de instrucțiuni.

Nota de informare este furnizată cu fiecare cutie și trebuie citită cu atenție înainte de utilizare.

Această notă de informare este redactată conform standardului UNI EN ISO 16321-1:2022.

Acest EIP a fost certificat ca EIP de categoria II pentru dispozitive destinate utilizării în scopul protejării persoanei care le poartă de riscul de a fi lovită prin impacturi ușoare cu corpuri străine. Dispozitivul R66 este fabricat în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate impuse de Regulamentul european 2016/425 și conform standardului UNI EN ISO 16321-1:2022.

C) IDENTIFICAREA MODELULUI DE ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

Vizieră de protecție R66 - Cadru cu 6 scuturi transparente din policarbonat.

D) INSTRUCȚIUNI PENTRU PĂSTRARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE**• Instrucțiuni de purtare**

Puneți-vă EIP și poziționați-l corect pe față, astfel încât scutul să acopere fața în punctele potrivite și asigurându-vă că este bine potrivit pe față, reglând curelușa în funcție de fața/capul utilizatorului. Performanțele acestui EIP sunt garantate atunci când acesta este corect purtat și poziționat. În cazul în care sesizați vizual cea mai mică urmă de deteriorare, întrerupeți utilizarea și înlocuiți echipamentul cu unul nou. Modificările EIP nu sunt permise.

• Mărimi

Dispozitivul este conceput ca mărime universală, dar prin utilizarea curelușei reglabile se adaptează perfect la orice formă a feței.

• Note privind ambalarea și instrucțiuni pentru păstrare

Ambalarea finală a produsului trebuie să fie efectuată astfel încât acesta să rămână nealterat până la momentul utilizării și pe toată perioada de folosire. Produsul în cauză nu are dată de expirare; produsul trebuie păstrat în ambalaje nedeschise și sigilate, ferit de surse directe de căldură.

• Eliminare

În cazul în care dispozitivele nu au fost contaminate cu substanțe sau produse speciale, acestea pot fi eliminate ca deșeuri normale de plastic, în caz contrar trebuie eliminate în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru deșeurile speciale.

E) INSTRUCȚIUNI SPECIFICE PENTRU CURĂȚARE ȘI/SAU DEZINFECTARE

Pentru a curăța viziera, umeziți o cârpă cu săpun și dezinfectant care nu este pe bază de alcool și ștergeți ușor cadrul și scutul, îndepărtând petele și murdăria.

F) DETALII PRIVIND DOMENIUL DE UTILIZARE, INTERVALUL DE MEDIU DE UTILIZARE PRECONIZAT, CAPACITĂȚILE DE PROTECȚIE ȘI CARACTERISTICILE DE PERFORMANȚĂ

Orice altă utilizare decât cea indicată este considerată necorespunzătoare și eventualele daune nu pot fi imputate producătorului.

Materiale utilizate - Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a materialelor.

G) AVERTISMENTE

- Viziarele de protecție trebuie înlocuite ori de câte ori transparența este afectată de zgârieturi sau de o eventuală opacizare.
- Viziarele care au fost supuse unor impacturi nu mai trebuie utilizate și trebuie aruncate și înlocuite.
- Echipați-vă cu EIP înainte de a vă expune la riscul împotriva căruia a fost proiectat acest EIP.
- Utilizați numai piese de schimb originale furnizate de producător.
- Acest EIP trebuie să fie montat cu toate părțile sale și a fost proiectat pentru impacturi frontale. Nu protejează împotriva impacturilor din partea de sus, din cauza spațiului dintre scut și cadru.

H) ORGANISM NOTIFICAT

Viziera model R66 aparține categoriei II de EIP și, prin urmare, are nevoie de aprobarea UE a tipului, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 de către un organism notificat: Organism notificat nr. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)
Link conformitate: info@larident.it.

I) MARCAJ

Identificarea marcatului de pe lentilă

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (Marcaj CE) – LARIDENT (Producător) – R66 (Nume produs) – 1 (Performanțe optice sporite)

Identificarea marcatului de pe cadru

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Standard) – LARIDENT (Producător) – 1-M (Cap de încercare ISO 18526-4) – R66 (Nume produs) – CE (Marcaj CE)

ADRESĂ: www.larident.it (utilizatorul poate găsi adresa completă a producătorului în nota de informare și pe acest site web)

J) SIMBOLURI UTILIZATE ÎN INSTRUCȚIUNI ȘI ETICHETE

Simbolurile utilizate pe instrucțiuni și cutie sunt următoarele, bazate pe regulamentul UNI EN ISO 16321-1:2022



Simbol citiți cu atenție
instrucțiunile



Marcaj de conformitate CE

K) INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

- Scoateți foliile de protecție de pe ambele părți.
- Scutul trebuie să fie poziționat pe partea exterioară a cadrului, cu deschiderea pentru nas îndreptată în jos.
- Introduceți scutul în cele două clapete laterale ale cadrului, trecându-le prin gaura mai mare din scut și blocându-le apoi cu gaura mai mică.
- Rețineți că trebuie să ajustați viziera după forma feței dvs., astfel încât aceasta să se lipească bine de pomeți.
- Viziera era gata de utilizare.

